

# Gebrauch des Lifeline VIEW AED

## Die Rettungskette



# Gebrauch des Lifeline VIEW AED



## Wann ?


- Bei plötzlichem Herz-Kreislaufstillstand, wenn der Patient bewusstlos ist und nicht auf Ansprache oder Reize reagiert, ohne normale Atmung ist.
- Benutzen Sie die Kinder-/Säuglingselektroden, wenn der Patient jünger als 8 Jahre alt ist.

## Wann nicht ?

Der Patient weist wenigstens eines der folgenden Anzeichen auf:

- ist wach und/oder reagiert auf Ansprache oder Reize
- atmet (Patient hat einen tastbaren Puls)

# Gebrauch des Lifeline VIEW AED

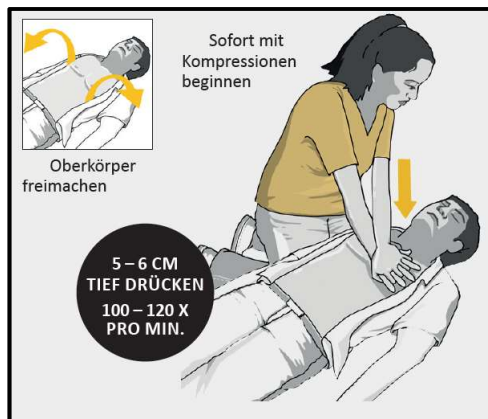

## Überprüfung der Atmung

### 1. Atemwege frei machen

durch Anheben des Kinns, den Hals überstrecken

### 2. Max. 10 Sekunden auf normale Atmung prüfen


- **Sehen** - Hebt und senkt sich der Brustkorb?
- **Hören** - Atemgeräusche vorhanden?
- **Fühlen** - Gibt es Atemluft?

## Kompressionen

- 30 mal drücken, 2 mal beatmen

# Gebrauch des Lifeline VIEW AED

So einfach wie das **ABC**

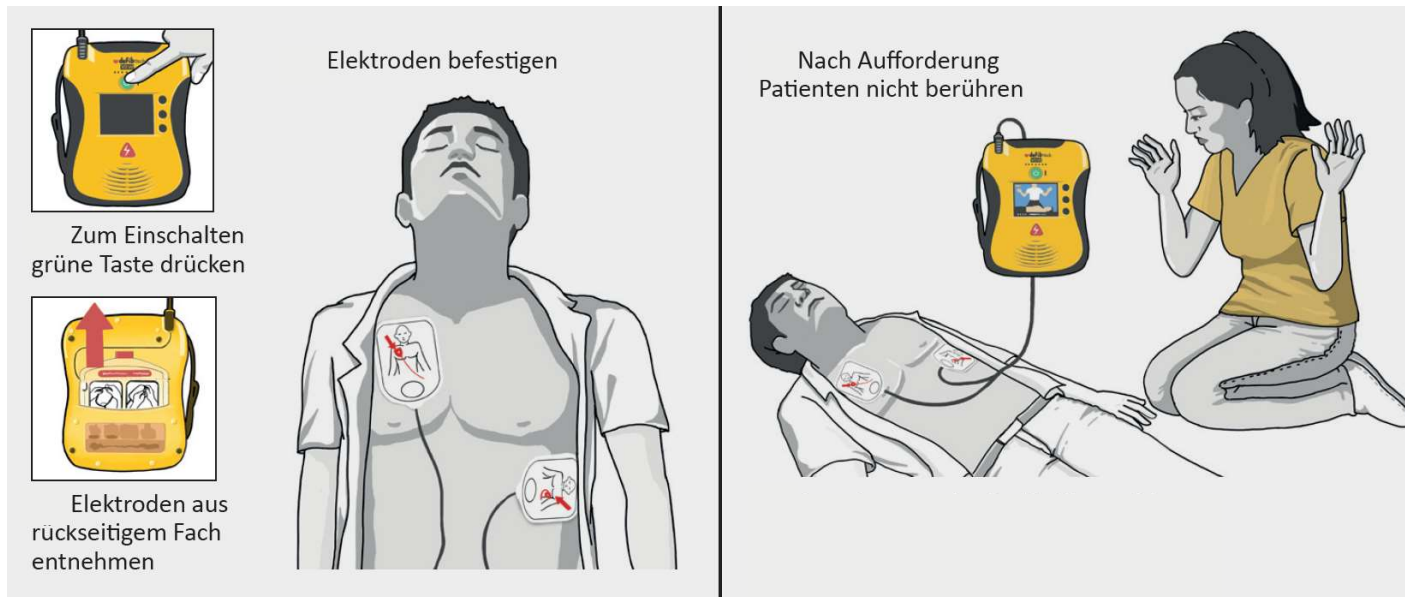

**A**nschalten des AED!

**B**efestigen der Elektroden!

**C**omputerstimme folgen!


# Gebrauch des Lifeline VIEW AED

## Befestigen der Elektroden am Patienten

### Erwachsenenelektroden für Erwachsene und Kinder von ab 8 Jahren

Eine Elektrode direkt unterhalb des rechten Schlüsselbeins auf die Haut des Patienten.

Zweite Elektrode über den Rippen an der linken Seite des Patienten unterhalb der linken Brust.

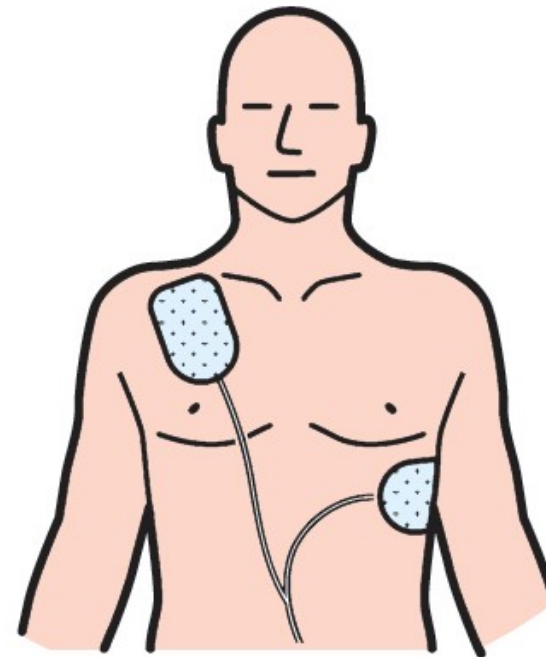


# Gebrauch des Lifeline VIEW AED

## Befestigen der Elektroden am Patienten

### Kinder- / Säuglingselektroden für Säuglinge und Kinder unter 8 Jahre

Jeweils eine Elektrode auf die Mitte der  
Brust und des Rückens

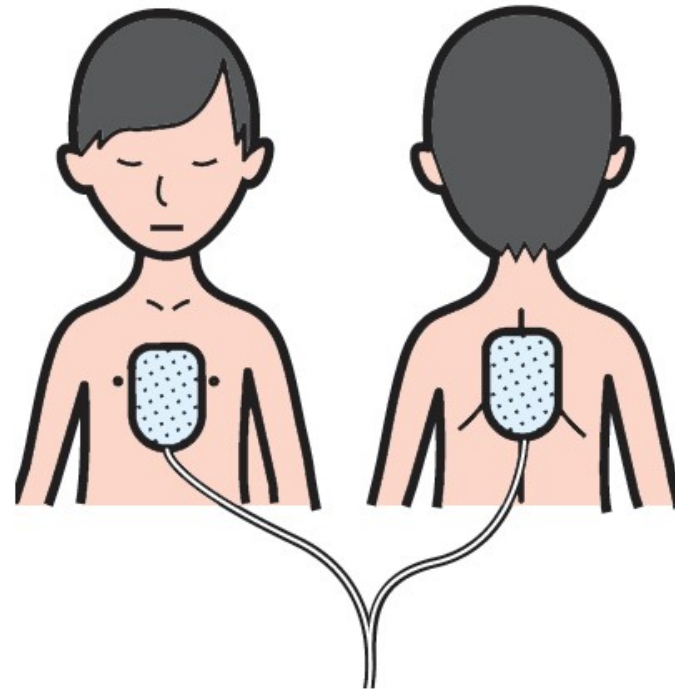


# Gebrauch des Lifeline VIEW AED

Anweisungsschritte Folgen dem Algorithmus „Basic Life Support“ (BLS) gemäß Richtlinien ERC 2015


Auszug nach der Schockabgabe:

„SIE KÖNNEN DEN PATIENTEN JETZT GEFAHRLOS BERÜHREN“

„BEGINNEN SIE JETZT MIT DER HERZ-LUNGEN-WIEDERBELEBUNG“

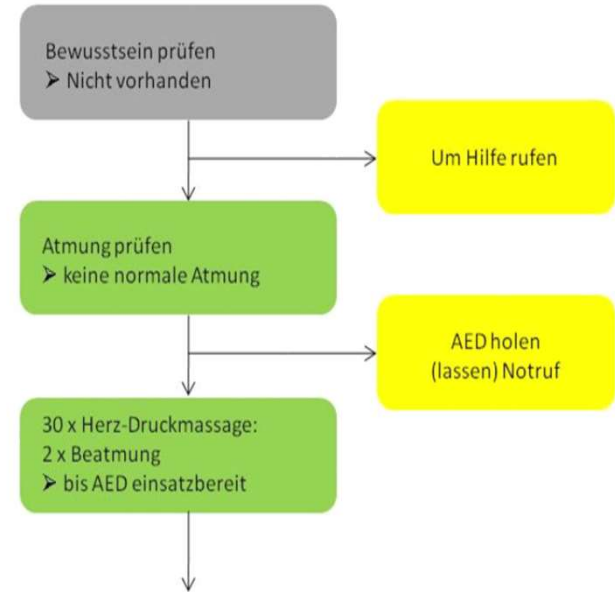

## Anweisungen des AED beachten

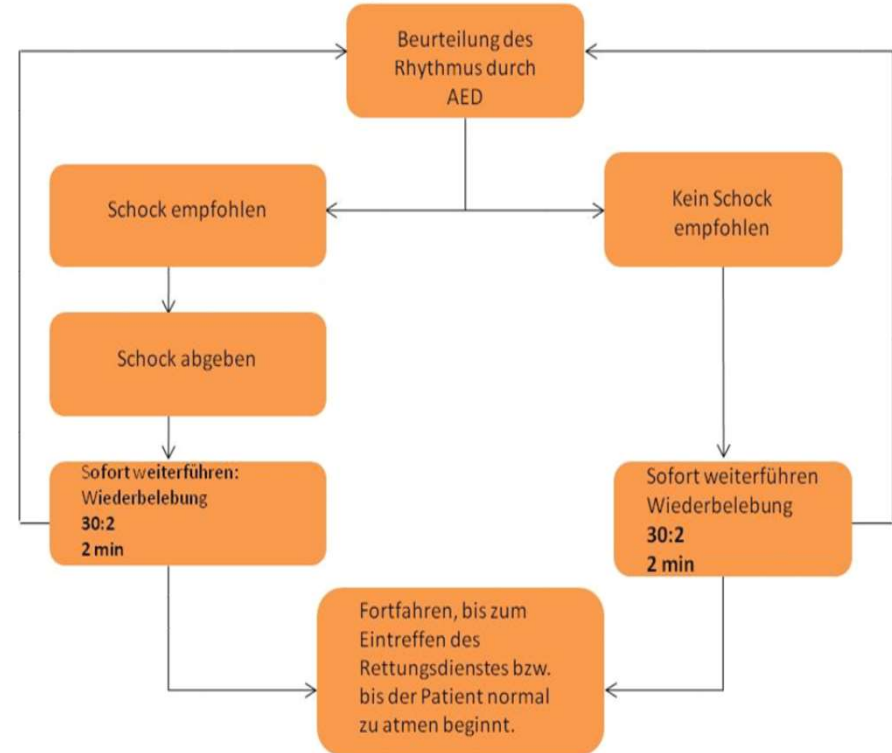

# Nach dem Gebrauch

- Datenkarte, wenn vorhanden, entfernen und durch eine neue Karte ersetzen.
- Falls keine Datenkarte vorhanden, Datenkarte zur Auslese des Ereignisprotokolls anfordern
- Ein neues Elektrodenpaket mit dem AED verbinden (Prüfen, ob das Verfalldatum noch nicht überschritten wurde).
- Batteriepack einsetzen. Prüfen, ob der Selbsttest abläuft.
- Über das Wartungsmenü unter „AED Wartung“ einen manuellen Selbsttest durchführen.
- Darauf achten, dass die Aktivitätsstatus - Anzeige grün blinkt.

